

Gebrauchsanweisung Community-Maske (Behelfsmaske für Mund- und Nasenbereich):

Vergewissern Sie sich vor dem aufsetzen der Maske, dass Ihre Hände sauber sind.

Vor dem Gebrauch ist die Maske auf Beschädigungen und Verschmutzungen zu prüfen. Treten diese auf, darf die Maske nicht verwendet werden.




1. Setzen Sie die Maske, mit der blauen Seite nach außen und dem Nasenbügel nach oben, unterhalb des Kinns an das Gesicht an.
2. Ziehen Sie die rechte Ohrenschleife über das rechte Ohr.

3. Ziehen Sie die linke Ohrenschleife über das linke Ohr.

4. Legen Sie die Finger beider Hände mittig an den Nasenrücken, und drücken von der Mitte zu den Seiten, bis der Nasenbügel vollständig die Form des Nasenrückens annimmt.

5. Dehnen und erweitern Sie die Maskenfalten, um Mund, Nase und Kiefer zu bedecken.

Die Maske ist für den einmaligen, nicht medizinischen Gebrauch bestimmt.

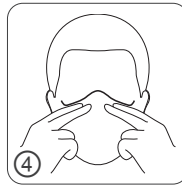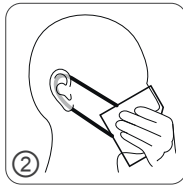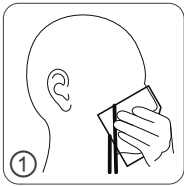

Lagerung und Transport

- Vor Gebrauch ist das Produkt auf die Haltbarkeit zu prüfen. Das Haltbarkeitsdatum ist auf der Produktverpackung angegeben.
- Die Maske sollte sauber und trocken in Innenräumen bei Raumtemperatur und einer Luftfeuchtigkeit von maximal 80% gelagert werden (Sonneneinstrahlung vermeiden).
- Das Produkt ist vor Feuer, Nässe, Säure, Alkalien und direkter Sonneneinstrahlung zu schützen.
- Das Produkt ist in der Originalverpackung zu transportieren.

Sonstige Hinweise:

- Die Maske besteht aus 3 Lagen. Die Außenlagen bestehen aus Vliesstoff, die filternde Innenlage aus Meltblown-Vliesstoff.
- Verwendungszeit: Diese bestimmt sich je nach persönlichen Nutzungsbedingungen und der Umgebung. Die Maske sollte jedoch sofort ersetzt werden, wenn das Atmen schwierig oder unangenehm wird. Sie sollte auch ersetzt werden, wenn die Maske verschmutzt bzw. kontaminiert ist, wenn der Benutzer das Gefühl eines erhöhten Atemwiderstands hat, wenn die Maske beschädigt ist oder wenn andere negative Bedingungen vorliegen.
- Die Filterschicht darf nicht ausgetauscht werden.