

# ANLEITUNG FÜR COVID-19 ANTIGEN SCHNELLTEST (LATEX)

Der Schnelltest ohne Rachenabstrich

### ANLEITUNG FÜR COVID-19 ANTIGEN SCHNELLTEST (LATEX)

Bitte lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch und bewahren Sie das Testkit und die Proben vor dem Test bei Temperatur 15 °C -30 °C auf.

#### I. Hinterer oropharyngealer Speichel/Sputum

- Mit Wasser den Mund spülen und ausspucken. Dies ist wichtig, um sicherzustellen, dass sich keine Mundbakterien im gesammelten Sputum befinden.  
\* Es wird empfohlen, am frühen Morgen mit dem Sputum / oropharyngealen Speichel zu testen. Direkt nach dem Aufwachen, bevor die Zähne geputzt, der Mund gespült oder gefrühstückt wird.
- Husten Sie intensiv und mit dem Geräusch „Krrruua“ in dem Hals, um Sputum / oropharyngealen Speichel aus dem tiefen Hals zu erhalten.
- Schrauben Sie das Probenentnahmeröhrchen ab.
- 200 µl frische Sputum- / oropharyngeale Stuhlprobe in den Behälter in das
- Geben Sie drei Tropfen der Probe senkrecht in das Probefeld.
- Das Ergebnis können Sie nach 20 Minuten oder länger ablesen, und es wird zu

### ANLEITUNG FÜR COVID-19 ANTIGEN SCHNELLTEST (LATEX)

Bitte lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch und bewahren Sie das Testkit und die Proben vor dem Test bei Temperatur 15 °C -30 °C auf.

#### II. Stuhl-Probe

- Schrauben Sie das Probenentnahmeröhrchen ab.
- Verwenden Sie den Probenabstabs, um an 6 Punkten etwa 30 mg frische Stuhlproben aufzunehmen (entspricht der Größe eines Streichholzkopfes).
- Drücken Sie das Probenentnahmeröhrchen fest ein, damit sich der Stuhl besser auflöst.
- Drücken Sie das Probenentnahmeröhrchen zusammen, damit sich der Stuhl besser vermischt.
- Schrauben Sie das Probenentnahmeröhrchen ab.
- 200 µl frische Stuhlprobe in den Behälter in das
- Geben Sie drei Tropfen der Probe senkrecht in das Probefeld.
- Das Ergebnis können Sie nach 15 Minuten ablesen. Wenn Sie nach 20 Minuten oder länger kein Ergebnis entnehmen können, ist

**Positive** (C, T lines visible)

**Invalid** (C, T lines missing)


**Invalid** (C, T lines missing)

JOINSTAR Biomedical Technology Co. LTD., China

# ANLEITUNG FÜR COVID-19 ANTIGEN SCHNELLTEST (LATEX)

Bitte lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch und bewahren Sie das Testkit und die Proben vor dem Test bei Temperatur 15 °C -30 °C auf.

## I. Probe aus tiefem Rachenspeichel / Auswurf Probe

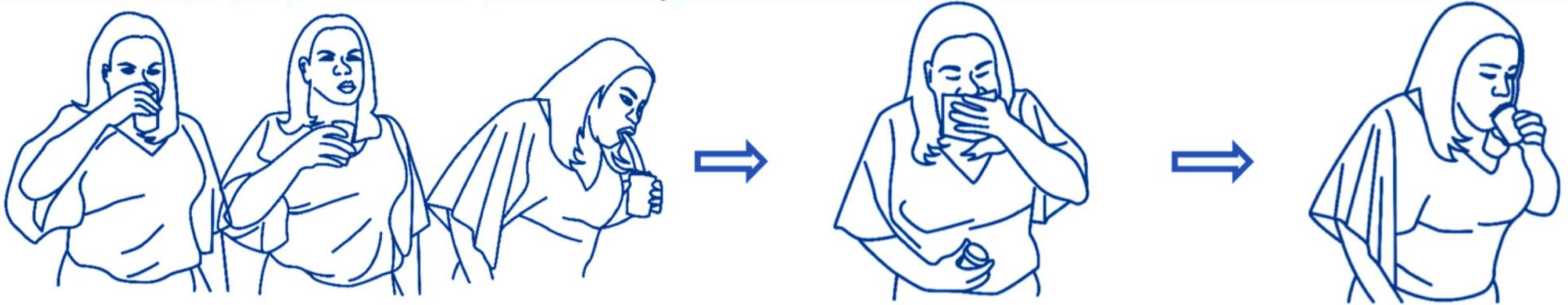


1. Mit Wasser den Mund spülen und ausspucken. Dies ist wichtig, um sicherzustellen, dass sich keine Mundbakterien im gesammelten Auswurf befinden.


\* Es wird empfohlen, am frühen Morgen mit dem Auswurf / tiefen Rachenspeichel zu testen. Direkt nach dem Aufwachen, bevor die Zähne geputzt, der Mund gespült oder gefrühstückt wird.

2. Husten Sie intensiv und machen Sie das Geräusch „Krruuua“ aus dem Hals, um Auswurf / tiefen Rachenspeichel aus dem hinteren Hals zu erhalten.


3. Sobald sich der Auswurf / Speichel in Ihrem Mund befindet, geben Sie ihn in den Behälter. Wiederholen Sie drei bis vier Mal, um eine ausreichende Menge für die Probe zu erhalten.

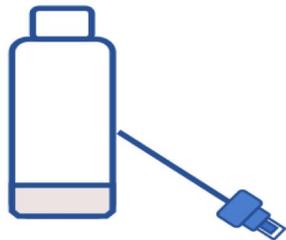

4. Schrauben Sie das Probenentnahmeröhrchen ab.

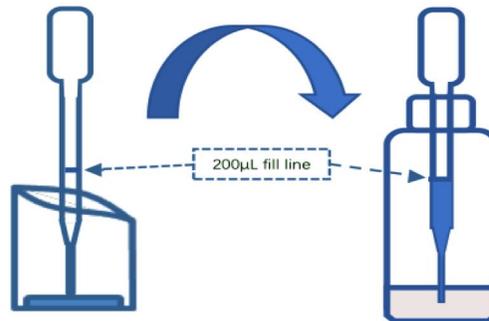


5. Frischen Auswurf / Rachenspeichel 200 µl aus dem Behälter in das Probenentnahmeröhrchen überführen.

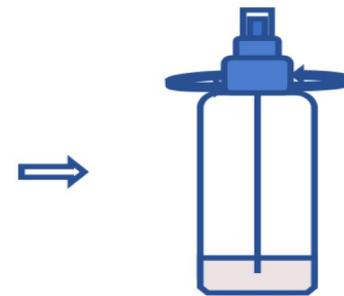


6. Drehen Sie das Probenentnahmeröhrchen fest ein.

# ANLEITUNG FÜR COVID-19 ANTIGEN SCHNELLTEST (LATEX)


Bitte lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch und bewahren Sie das Testkit und die Proben vor dem Test bei Temperatur 15 °C -30 °C auf.

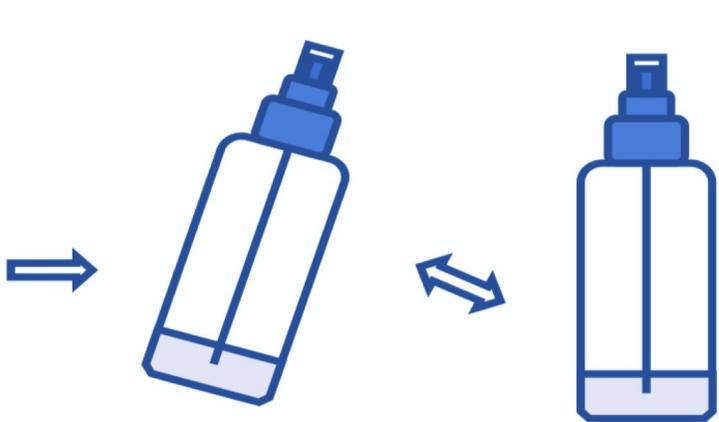


7. Kippen Sie das Fläschchen hin und her und mischen Sie den Inhalt vollständig.

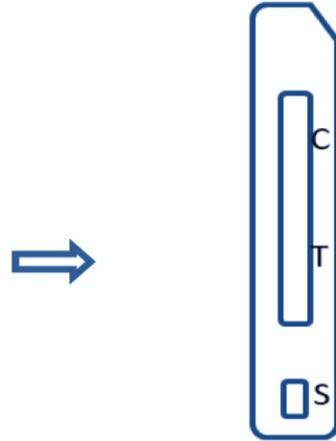


8. Nehmen Sie die Testkassette aus der Verpackung und legen Sie sie flach auf den Tisch.

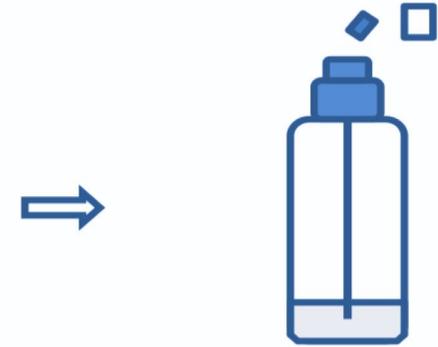

9. Trennen Sie den Überstand des Sammelröhrchens ab.

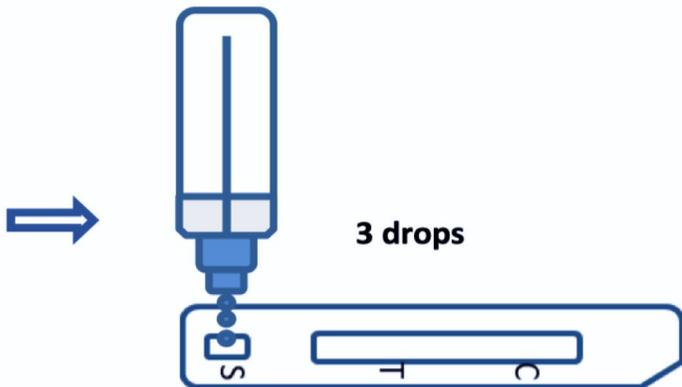

10. Geben Sie drei Tropfen der Probe senkrecht in das Probefeld.

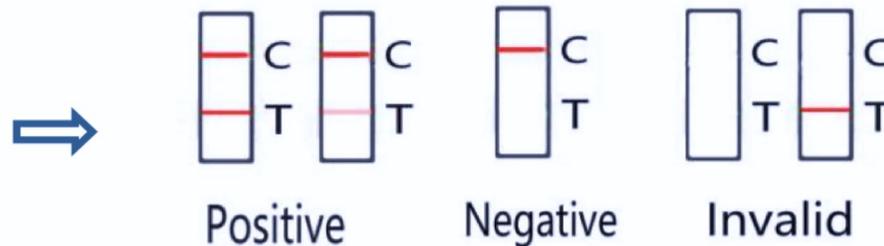

11. Das Ergebnis können Sie nach 15 Minuten ablesen. Wenn Sie nach 20 Minuten oder länger kein Ergebnis entnehmen können, ist der Test ungültig, und es wird zu einem Wiederholungstest empfohlen.

# ANLEITUNG FÜR COVID-19 ANTIGEN SCHNELLTEST (LATEX)

Bitte lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch und bewahren Sie das Testkit und die Proben vor dem Test bei Temperatur 15 °C -30 °C auf.


## II. Stuhl-Probe



1. Schrauben Sie das Probenentnahmeröhrchen ab.




2. Verwenden Sie den Probeentnahmestab, um an 6 Punkten etwa 30 mg frische Stuhlproben aufzunehmen (entspricht der Größe eines Streichholzkopfes).

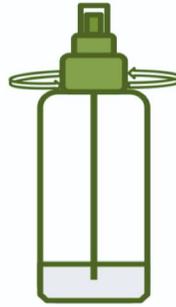


3. Drehen Sie das Probenentnahmeröhrchen fest ein.




4. Drücken Sie das Probenentnahmeröhrchen zusammen, damit sich der Stuhl besser auflöst

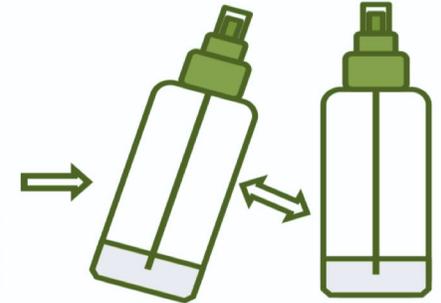


5. Kippen Sie das Fläschchen hin und her damit sich der Stuhl besser vermischt.

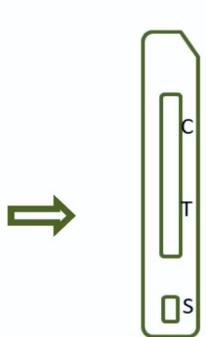


6. Nehmen Sie die Testkassette aus der Verpackung und legen Sie sie flach auf den Tisch.

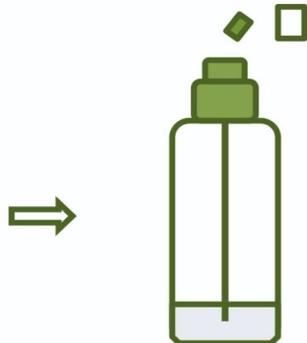

7. Trennen Sie den Überstand des Sammelröhrchens ab.

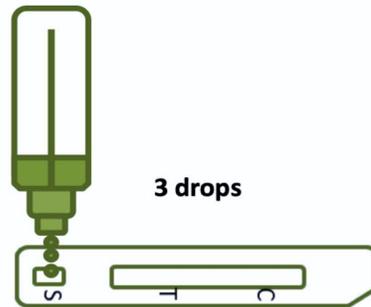

8. Geben Sie drei Tropfen der Probe senkrecht in das Probefeld.

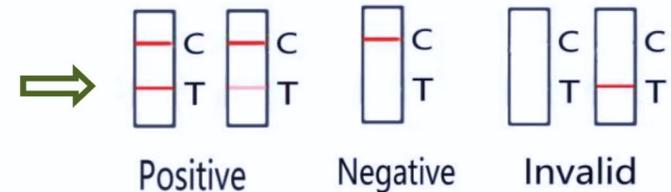

9. Das Ergebnis können Sie nach 15 Minuten ablesen. Wenn Sie nach 20 Minuten oder länger kein Ergebnis entnehmen können, ist der Test ungültig, und es wird zu einem Wiederholungstest empfohlen.